

Käyttöohjeet

JW-Liquid Dam on valokovetteinen iensuoja-aine, jota käytetään samalla tavoin kuin kofferdamia eristämään ikenet hoidettavista hampaista.

Käyttötarkoitus:

Ikenien suojaus vastaanottovalkaisun yhteydessä.

Kontraindikaatiot:

Sietokyvyttömyys ainesosille

Esivalmistelu:

Tee tarvittavat toimenpiteet (esim. suunaukipitäjää) varmistaaksesi, että kieli ja huulet ovat turvallisesti poissa tieltä toimenpiteen (ja sitä seuraavan valkaisun) aikana ja että ne eivät joudu kosteuksiin aineen kanssa. Poista ruiskun korkki ja aseta tilalle ruiskun annostelukärki. Säätöstele aineen virtausta.

Käyttö:

Kuivaa ikenet. Levitä JW-Liquid Dam -ainetta noin 4–6 mm leveydeltä ja 2 mm paksuudelta suojattavalle alueelle ja paina ainetta hammasväleihin. (Kuva 1) Koveta 20–40 sekuntia tavallisella valokovettajalla. Älä pidä valokovettajaa liian pitkään yhdessä paikassa. Kovettamisen jälkeen poista ylimääräinen aine hampaista skalpellilla. Tämän jälkeen voit levittää valkaisugeelin. (Kuva 2).

Viimeistely:

Valkaisun jälkeen poista JW-Liquid Dam -iensuoja tarttumalla siihen reunasta instrumentilla, kuten koettimella, ja vetämällä suoja irti. Poista annostelukärki ruiskusta ja sulje ruisku korkilla. (Kuva 3)

Säilyvyys ja säilytys:

JW-Liquid Dam -iensuoja-ainetta ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Säilytä JW-Liquid Dam valolta suojattuna. Vältä korkeita lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa. Säilytä 3–25 °C:ssa.

Vaaralauseke:

Sisältää tetrametyyleeni dimetakrylaattia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Turvalausekkeet:

Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvosuojainta. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: hakeudu lääkäriin.



heydent[®]

Experience the difference

Viktor Frankl Str. 20 86916 Kaufering
Germany

Tel: +49 8191 9737804

www.heydent.com info@heydent.com

CE 0297



GDF Rossbach
Germany