

Mikäli et täysin ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältöä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöohje
JW Power Bleaching NEXT on valkaisugeeli, joka on tarkoitettu ainoastaan vastaanottokäyttöön. Hammaslääkäri käyttää ainetta yksittäisten hampaiden valkaisuun. JW Power Bleaching NEXT sopii ihanteellisesti devitaalien hampaiden kirkastamiseen, mukaan lukien juurihoidetut hampaat. Tuotteen 4:1-automaattiruisku (patruuna) sisältää valkaisugeeliä ja tehosteainetta. Yhdessä kaksoisruiskussa on 5 g ainetta. Valmiin geelin vetyperoksidipitoisuus on 35 %.

Käyttötarkoitukset
–Värjäätynneiden, devitaalien hampaiden valkaisu
–Sairauden, vamman tai hoitoperäisen haitan värjäämien hampaiden valkaisu vaihtoehtona hammaskruunulle tai -laminaatille
–Lääkkeiden (esim. tetrasykliini) hampaille aiheuttamien värjäytymien poisto

Kontraindikaatiot
–Paljastunut dentiini
–Vialliset hammaspaikkojen reunat
–Yliherkkä potilas
–Allergia tai sietokyvyttömyys ainesosille
–Raskaus ja imetys (ei riittävästi tietoa)

Jotkut potilaat saattavat kokea vähäistä vihlontaa hampaissaan hoidon aikana tai sen jälkeen, mutta tavallisesti tämä menee pian ohi.
Keskeytä hoito välittömästi, jos potilas tuntee kohtuutonta kipua.

Esivalmistelu
Määritä hampaan väri vertaamalla sitä Vita® Shade Guide -sävykarttaan. Arvioidaksesi värejä järjestä Vita® Shade Guide -sävykartta uudelleen seuraavasti.

Sävyn mukaan järjestetyt arvot:
A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Kirkkauden mukaan järjestetyt arvot:
B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D3 A3 D4 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4

B2-B1 = Arvot kaksinkertaistuvat
A3-A2 = Arvot nelinkertaistuvat

Puhdista potilaan hampaat ilmaruiskulla tai puhdistustahnalla. Käytä suunaukipitäjää tai vastaavaa instrumenttia. Suojaa ikenet (esimerkiksi iensuoja-aineella tai kofferdamilla). Älä käytä puudutusaineita. Erilliset ainesosat (geeli ja tehosteaine) sekä valmis valkaisugeeli ärsyttävät ihoa ja limakalvoja ja vaurioittavat vakavasti silmiä. Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. JOS AINETTA JOUTUU SILMÄÄN: Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Käyttö
Poista ensin suojapuristin sekä korkki siten, että ruisku on suunnattu pois päin potilaasta ja itsestäsi. Kiinnitä sekoituskärki korkin paikalle. Purista sitten geeliä ruiskusta niin kauan, että kärjestä tulee ulos väritään tasaista, geelimäistä massaa. Hävitä epätasainen massa.
Jos ainetta säilytetään pitkiä aikoja korkeassa lämpötilassa, geeliin voi joskus muodostua kuplia. Tämä voi tehdä seoksesta epätasaista ja tavallista nestemäisempää, erityisesti kaksoisruiskun loppupäässä. Jos näin käy, älä käytä ainetta.
Geeliä tulee levittää noin 1–2 mm paksuudelta valkaistavien hampaiden huulen puoleiselle pinnalle. Sekoituskärki on suunniteltu levittämään geelin tasaisesti.

Tehostaaksesi lopputulosta voit käyttää tavallista valokovettajaa tai laservaloa. Tällöin sekä hammaslääkärillä että potilaalla on oltava suojalasit. Noudata valmistajan ohjeita.
Älä anna ylikuumentua.
Noin kymmenen minuutin vaikutusajan jälkeen ime geeli pois ja pyyhi jäämät. Jos valkaisuulos on riittämätön, toimenpide voidaan toistaa kahdesti, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.
Ennen jokaista hoitokertaa on varmistettava, että ikenien suojaus on riittävä.
Sen jälkeen määritetään hampaan väri uudestaan.

Viimeisen valkaisu-toimenpiteen jälkeen ime geeli pois, pyyhi jäämät ja huuhtelee huolellisesti vedellä. Kuivaa sitten hampaan pinta ja kiillota kiillotustahnalla. Jälkeenpäin on suositeltavaa mineralisoida hampaat After-Bleach-Carella, fluoriliuoksella tai fluorigeelillä. Näin voidaan myös lievittää kipua, jos vihlontaa ilmenee.
Jos ainetta on yhä jäljellä uutta valkaisu-kertaa varten, poista sekoituskärki ja aseta sininen korkki takaisin paikalleen. Säilytä aine jääkaapissa. Käytä seuraavalla käsittelykerralla uutta sekoituskärkeä.
Potilas ei saa syödä, juoda tai tupakoida tuntiin toimenpiteen jälkeen. Vahvasti värjääviä aineita (esim. punaviiniä, kahvia) sekä happamia ruokia tulisi välttää toimenpidettä seuraavina päivinä.
Huomio: Valkaisu ei tehoa yhdistelmämuovipaikkoihin eikä keraamisiin tai metallisiin täytteisiin. Paikat olisi siksi syytä vaihtaa kaksi viikkoa toimenpiteen jälkeen.

Devitaalit tai juurihoidetut hampaat
Geeliä levitetään myös hampaan kielenpuoleisen hammasontelon kautta. Tarkista ensin alveoliarjanteen korkeus. Poista sitten täytemateriaali kokonaan hampaan sisältä. Lisää vain yksi kerros lasi-ionomeeritäytettä 1–2 mm paksuudelta hammasontelon pohjalle samalle tasolle alveoliarjanteen tai hampaan kruunun kanssa. Levitä iensuoja-ainetta sekä huulen että kielen puolelle. Levitä sitten valkaisu-geeliä huulen puoleiselle pinnalle edellä olevan ”Käyttö”-kohdan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi levitä geeliä hammasonteloon. Anna geelin vaikuttaa 10 minuuttia. Sen jälkeen ime varovasti geeli pois ja huuhtelee kevyesti vedellä. Jos valkaisuulos on riittämätön, toimenpide voidaan toistaa kahdesti, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Viimeisen valkaisu-toimenpiteen jälkeen ime geeli pois ja huuhtelee huolellisesti vedellä. Poista iensuoja varovasti. Sulje seuraavaksi hammasontelo väliaikaisella paikkamateriaalilla, joka ei sisällä eugenolia. Odota kaksi viikkoa ennen pysyvän paikan tekemistä.

Säilyvyys / Säilytys
Älä käytä JW Power Bleaching NEXT -ainetta viimeisen käyttöpäivän jälkeen, sillä riittävää valkaisuulos ei voida silloin enää taata. Säilytä valkaisu-geeliä jääkaapissa 3–9 °C:ssa. Ei saa jäättyä.

Tuote sisältää vetyperoksidia, kaliumnitraattia, natriumfluoridia, natriumhydroksidia, glykolin johdoksia, sakeuttamisaineita ja väriaineita.

Mahdolliset ongelmat ja niiden ratkaisut

Riittämätön valkaisuulos	Toista valkaisu-toimenpide (useita kertoja jos on tarpeen)
Potilas tuntee kipua.	Geeli on joutunut kosketuksiin paljaan hammasluun tai irtonaisen paikan kanssa (suojaa ne ennen hoitoa). Potilas on erityisen herkkä (yksilöllisestä hammasrakenteesta johtuen).
Hammaskiilteessä on valkoisia pilkkuja valkaisuun jälkeen	Paikallinen demineralisaatio tai kuivuminen. Palautettavissa. Häviää fluorauksen jälkeen.
Ikenet ovat värjäytyneet valkoisiksi hoidon jälkeen (peruttavissa)	Ikeniä ei ole suojattu riittävästi tai suoja on ollut löysällä.
Patruunasta tuleva geeli ei ole tasalaatuista (väriltöntä / punaista)	Ilmakuplia geelissä liian kuumassa lämpötilassa tai liian pitkään säilyttämisen seurauksena.
Yhdistelmämuovisten laminaattien tarttuvuus heikentynyt valkaisuun jälkeen	Peroksidijäänteitä. Korjaa vasta 1–2 viikon kuluttua.

heydent

Experience the difference

Viktor Frankl Str. 20 86916 Kaufering
Germany
Tel: +49 8191 9737804
www.heydent.com info@heydent.com

CE 0297

 GDF Rossbach
Germany